



الاستبليزر®

لكبح الخيول و أنظمة التدريب كما وصفه العامه, ان للاستبليزر® أحساسا رائعا!

الاستبليزر اداة عظيمة استخدمها في مجالي حمايه الخيول و التعامل معها. وباستخدام الاستبليزر استطعنا احضار الخيول لحقول الاستعراض بعد ان كنا نحضرهم في الماضي بالقيود الاعتيادية, ولكن مع الاستبليزر القابل للتعديل, حققنا نتائج مؤكده, فباستخدامه تصبح الخيول اكثر تركيزا.



كارل نافجرز مدرب خيول



حاصل علي جائزة (Thoroughbred Hall of Fame)

عند تقييمي الدقيق لتركيب هذه الاداه, وجدت ذلك الانبوب البلاستيكي الذي يقوم بحمايه اللثه و مناطق الرأس. كما يضغط علي نقاط تخفيف الالام عند الخيول المعروفه بمنطقتي T.H.17 و G.V.26.

توجد نقطة G.V.26 باللثه العليا تحديدا بين الاسنان العليا و تحت الشفاه العليا, وهي النقطة المسؤله عن افراز هرمون الأدرينالين عن استثارته. ولكن في حال تعرضها لضغط ا, لاستثارة دائمة يتوقف افراز هذا الهرمون مما يساعد علي تهدأه الخيول. كذلك لاحظت ذلك الحزام البلاستيكي المثبت خلف اذني الحصان حيث توجد نقطة T.H.17 وهي المسؤله في المقام الاول عن افراز الهرمونات المسكنه و المهدئه للخيول.

قد يبدو هذا الامر مشابها عند مداعبه القطط و الكلاب خلف أو تحت اذانهم و الذي يؤدي الي تهدئتهم. ولكن في حاله الخيول تعمل نظرية الشد و الأرخاء علي استثارة تلك المناطق و من ثم الوصول الي الهدف المرجو.

وهكذا و بفضل هذا القيد الرائع يصبح الحصان مغمورا بالسعادة بدلا من الألم, ولعل اكثر الأمور روعه انه اذا تولد هذا الشعور عند الحصان فانه يستمر و يدوم.

فهو علي نقيض غيره من الأدوات التي تترك شعورا وقتيا لايدوم. و يمكن للطبيب باستخدام هذه الاداه اجراء أي من العمليات الجراحية البيطرية بالصورة المرجوه دون ترك اي اثار سلبية علي الحصان قد تمنع من تكرارها في المستقبل. كذلك تساعد الحصان علي ان لا يتذكر من تجربته العمليات الجراحية سوي الاحساس بالمتعه.

مارفن كاين- طبيب بيطري

أستاذ علاج الوخز بالأبر محاضر و مؤلف



P - 1

على خلاف الانواع المعتادة للقيود, يحتوي الاستبليزر على ذلك الزرار الاحمر اللون, الذي يوزع الضغط على كاهه اجزائه, وكذلك يثبت الجوكر ويساعد في عمله ايقاف او تحميل او تدريب او امتطاء سهوة الحصان.



نتيجة للضغط الذي يسببه الاستبليزر, ينصرف أحساس الحصان عن الاعضاء التي يتم التعامل معها. واطهرت الدلائل ان الهرمونات و الأفرزات المهدئه يتم افرازها عند استثارة مراكز الأعصاب الحسيه. حيث تفرز من تلك المراكز وتعمل على عدم الشعور بالام و بالتالي تهدئه الحصان بشكل عام.

اظهر الاستبليزر في الاختبارات العمليه نتائج باهره عند استخدامه للمره الاولى. وأن تتطلب الامر مابعد المرة الاولى عند ترويض بعض الخيول.

P - 2

تركيب وضبط الاستبليزر ستة خطوات سهله و بسيطة

(انظر صورة رقم 3 لبيان التركيب)

خطوة رقم 1

حرك زرار الضغط الأحمر (أ) تجاه المقبض (ب) بمقدار مناسب لتركيبه حول رأس الحصان. أدخل رأس الحصان عبر الاستبليزر واضبط الجزء (ج) خلف الأذن اليسري. ثبت الانبوب البلاستيكي تحت اللثة وخلف الشفا العليا (العكس كما في اللجام المعتاد) أنظر صورة رقم (ب-1)



خطوة رقم 2

تأكد ان الاسطوانه البلاستيكيه (د) تقع مقابل الحلقة المصنوعة من الالومنيوم (س) و البكرة السفلى (ص). عند تركيبك للاداه قف دائما على الجانب الايسر من الحصان كما هو الحال في اللجام المعتاد. وتأكد من صلاحية الاسطوانه البلاستيكيه و خلوها من اي كسور أو تشققات.

P - 3

خطوة رقم 3

ضع السلك الملون (ط) خلف الاذن و مؤخرة الراس تماما, بحيث تكون القطعه (ج) متصله بالسلك خلف الاذن اليسري. (انظر صورة ب-1). باستخدام يدك اليسري امسك الجزء الأسفل من الاستبليزر بواسطة أصبعي الإبهام والأوسط وثبته تحت الشفا العليا. وعليك تعديل الاستبليزر اذا ما دعت الحاجة.



خطوة رقم 4

استخدم اليمينى لتعديل وضبط الاستبليزر حول رأس الحصان. فور تثبيت الأسطوانة البلاستيكية تحت الشفا العليا انقل المقبض من يدك اليمينى لليسرثم استخدم إبهامك لتعديل زرار الضغط الاحمر (أ) للأعلى وصولا للبكرة (ف) أنظر صورة ب-2. في هذه المرحلة يتطابق الاستبليزر مع مقياس الرأس.

خطوة رقم 5

أمسك المقبض بقوة, ودر بالحصان جهة اليمين (أنظر صورة ب-4) خلالها قم بجذب المقبض للأسفل و أدفعه للأعلى ثلاث مرات على الأقل, ثم قم بالامر نفسه مع دوران الحصان جهة اليسار. ثم ثبت الحصان و تابع أسلوب الجذب و الدفع حيث يتم الضغط على النقاط المرجوه. أخيرا شد زرار الضغط الاحمر للأعلى للمره الثانيه باتجاه البكرة لدقيقتين لافراز المواد المسكنه. على المدرب تكرار الطريقه ذاتها اذا رغب في تهدئه الحصان بشكل اكبر.

P - 4


عليك اتباع تلك الطريقه بدقه, فلقد أثبتت نجاحها و انت بنتائج باهره بعد ثلاث أعوام من التجارب العمليه ومن نتائجها الاتي:

- 1- يشعر الحصان بسيطره المروض
- 2- أفرز المواد و الهرمونات المهدئه.
- 3- يألف الحصان على ذلك النوع من الضغط المطبق في الخطوة الأخيرة.

ستلاحظ انحاء رأس الحصان وتدل الشفا السفلى وستبدو نظرة الحصان كما لو كان يشعر بالنعاس. عندها يصبح الحصان مستعدا لاي عمليه تريد القيام بها.



P - 5

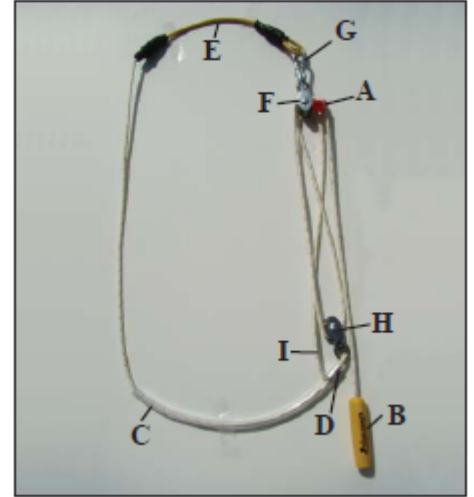

خطوة رقم 6

لنزع الاستبليزر اسحب زرار الضغط الاحمر للأسفل لتخفيف ضغط الاجزاء عن الرأس ومن ثم قم بالسحب.

هام جدا !!

عند استخدام الاستبليزر لفترات طويلة قم بتحريك زرار الضغط الاحمر لتخفيف الضغط بمقدار يتراوح من نصف الي ثلاث أرباع البوصه. ومن ان لآخر قد بالتعديل ان استدعت الحاجة.

الضبط و التعديل

يصنع الاستبليزر خصيصا بمقاسات مخصصه, ولكن في بعض الحالات و من ان لآخر يستدي الامر بعض التعديلات في طول الاحزمه. لهذا قد صمم بحيث يصبح بالامكان تعديله بصورة سريعة و بسيطة (أنظر صورة ب-6) ويمكن الرجوع للفيديو المرفق والخطوات التاليه لمزيد من التوضيح:

تعديل و ضبط طول الاستبليزر بشكل عام

يعتمد حصريا على الحلقة المعدنيه المصنوعة من مادة الألومنيوم.


أمسك البكرة (ص) باصبعي السبابة والأبهام لليد اليمنى. وادفع الحلقة المعدنيه بعيدا عن البكرة, عندها قم بسحب و تعديل طول الحبل (و) والذي بدوره يعدل طول الاستبليزر اجمالا. تذكر دائما انه لكي يؤتي الاستبليزر بثماره المنشوده اجعله ملائما لحجم رأس الحصان.


يأتي الاستبليزر في خمس مقاسات ملونه و مرمزه:

- 1- صغير جدا (أسود).
- 2- صغير (أزرق).
- 3- متوسط (أصفر).
- 4- كبير (أحمر).
- 5- كبير جدا (برتقالي).

البياطرة و التقنيين بعادات ديرين البيطريه يستخدمون الاستبليزر على مدار ثمانية أعوام وهم يؤيدون هذا المنتج بقوة. لقد وجدناه جهازا كدهشا و مساعدا في معظم العمليات خاصه مع الخيول الصغيره. لقد استخدمناه مع عدد كبير من الخيول عند معالجتهم بالموجات وكان له عظيم الأثر في من خلال عدم احساسهم بالألم.

P - 6

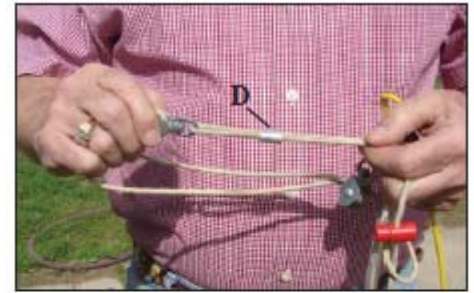

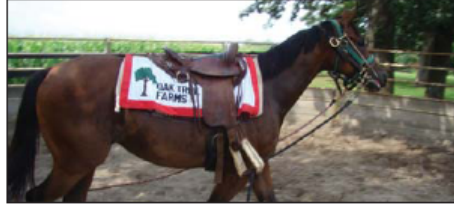

لم يسبق لي أجرة أي منتج من قبل، ولكني متأكد من اجارة هذا المنتج، كنت متشككا في بادئ الامر وانتهى بي الامر اني استخدمه دائما عند تركيب حدوان الخيول. ولايتركز الحصان الا تلك التجربة الممتعه. الاستبليزر تفوق على كل افكاره التقليديه.

بيت كوت

بيطري بعيادة جورنيمان الانتحابية
الجيش الامريكى



يساعد على ترويض و تدريب خيولك سبق لي استخدام الاستبليزر بعد ان احضره بوك لانجلترا واستفدت كثيرا من خبرته الهائله، ولقد حققت منفعة عظيمة من استخدامه بأعتبره أذاه فعاله جدا عند ترويض وامتطاء سهوه المهر. لقد استخدمناه مع الخيول دون سن السنه الواحده ولقد انتج جيلا مطيعا من الخيول لم نشاهدها من قبل.

كلايف بريتين

راسهورس مولبرج

نيوماركر - انجلترا




نستخدم الاستبليزر لتهدئه الخيول بدلا من الادوية المخدرة، وذلك لكونه اكثر الادوات انسانيه اذا ما تعلق الامر بأجراء العمليات الجراحية للخيول. وستلاحظ عند استخدامه ما نعتقد من انه المسؤول عن إفراز هرمون الاندورفين المثبط و الذي يعمل علي تهدئه الخيول بصورة طبيعيه و اجراء العمليات البيطرية بشكل ابسط. فهرمون الاندورفين هو العامل الفعال لهذه الاداه، انا اعتقد ان الاستبليزر هو الحل الامثل لاي شخص بسبب سلامه و سهوله استخدامه.

جو نويل طبيب بيطري

عيادة فيزتا الملكيه البيطريه

بورسيل - أوكلاهوم

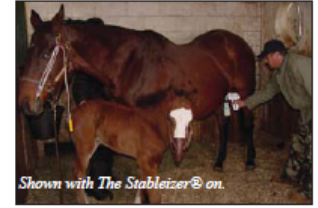

عند حلب اي حيوان نلاحظ توتره و امتناعه عن التعاون مع سواء المدرب وكذلك ولده، ولكن بعد استخدام الاستبليزر، المطور خصيصا للخيول، اصبحت الخيول اكثر هدونا مما يوفر البيئة الامنه للجميع.

تحذير هام لمشتري الاستبليزر!!

الرجاء قرائه هذا التحذير الهام عند استخدام هذا المنتج: لاتستخدم زراع الاستبليزر ابدا في ربط او تثبيت الحصان. ولاترك الحصان دون مراقبه عند استخدامك للاستبليزر. لا تستخدمه مع الحصان في حاله لتعرضه لأي نوع من انواع الاصابات في الفم و الرأس. وينصح بأستشارة الطبيب البيطري اذا شعرت بالشك تجاه امرا ما. هذا التحذير يأتي من قبل المنتج و المورد ولايقع علي عاتقهم الا استبدال اي كميته من المنتج في حاله عدم فاعليته. ولا تقع اس نوع من انواع المسؤليه علي عاتق المنتج و المورد في حاله سوء الاستخدام. و قبل الاستخدام يجب علي علي المستخدم ادراك صلاحية الاستخدام. و يتحمل المستخدم المسؤليه الكامله مهما كان صددها. التحذير السابق لايمكن تغييره الا من قبل المنتج او المورد.

الضمان

ان لم تقتنع بكفائه هذا المنتج، نرجو الاتصال اولاً، قبل الرجوع الي المورد مع قسيمة الشراء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشراء لاستبداله او لاعادة المبلغ. (لا يوجد استثناء). لايمكن ارجاع طلبات العملاء و الشرائط و الأقراص المضغوطة.