




# アダリーアイージー ミルカー

家畜用簡易ミルカー

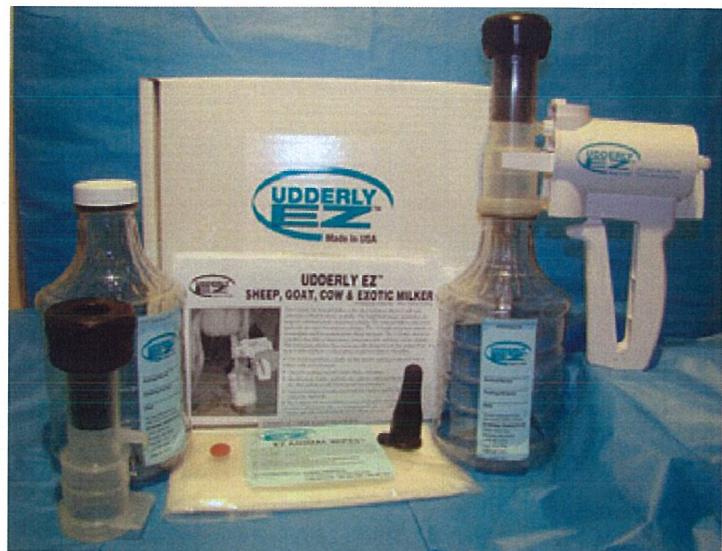

## アダリーアイージーミルカーはこんなときに お役に立ちます！！！

- \* 分娩直後の母親から初乳を搾り、すぐ子牛に与えるとき。
- \* 分娩直後の母親から初乳を搾り、将来の使用のために冷凍保存するとき。
- \* 乳房炎になった牛の乳房から搾乳するとき。
- \* 起立不能になった牛の搾乳をするとき。

アダリーアイジー カウ ミルカーキット 製品#77295

アダリーアイージーポンプ、コネクター、大・小2サイズの搾乳シリンダー、2個の黒ゴムライナー、ボトル用乳首、乳房拭用布、ミルク集乳ボトル2個（約950ml）



手で持てる引き金方式のポンプで、プラスティック製のフランジ付き抽出シリンダーを操作します。

ミルカーには、2サイズの異なるシリンダーが包装されています。抽出シリンダーは乳房の特異な形状にフィットするようにデザインされていて、乳房を傷つけない様に丸い形にしてあります。この装置は多くの獣医師や牧場管理者や種畜牧場等の専門家の意見やアイデアを集積してデザインされ、5年間テストされた商品です。

## ■セットの組み立て方法



1. 

搾乳シリンダーにライナーを差し込んでください。(シリンダー及びライナーは各々大・小二つのサイズが入っています。乳頭の大きさでいずれかのサイズを使ってください)

2. 

搾乳シリンダーをコネクターにはめ込んでください。

3. 

集乳ボトルにOリングのパッキンが付いていることを確認し、空気が漏れないように搾乳シリンダーに集乳ボトルを付けてください。  
注：ポンプハンドルを装着した後に集乳ボトルを決して付けないでください。ポンプハンドルを装着してから集乳ボトルを付けると、コネクター部分が欠けるおそれがあります。

4. 

コネクターにポンプハンドルをはめ込んでください。

5. 

セットが終わったら、手のひらの部分をライナーに押し当ててポンプを操作し、真空状態になっていくことを確認してください。

## ■使用方法



1. 洗浄ペーパーで乳房をきれいに拭き、付着した土やバクテリアを除去してください。
2. ミルクがスムーズに出るように、全ての乳頭を少なくとも 2 回程手で絞ってください。
3. 乳頭の先をやさしく搾乳シリンダーに差し込んでください。
4. ハンドルを少なくとも 2 回～3 回操作すると、ポンプが働いて真空状態になり乳頭がライナーに装着されます。
5. ミルクが流れ始めたらハンドル操作を止めてください。ミルクの流れが遅くなったり、止まったりした場合は、再度ハンドル操作をしてください。ミルクを搾り終わるか、必要量のミルクを搾ったら、次の乳頭の搾乳に移ってください。
6. ポンプの真空ロックを解除するにはボトルの底を持って、ポンプの方向に引いて、ライナーと乳頭に隙間を作つて空気を入れて行ってください。決してライナーをいきなり乳頭から引き抜かないでください。
7. 個体によって変化はありますが、通常最初の搾乳で 200cc ～350cc の初乳が集乳できます。
8. 上記の手順でもミルクが出ない場合は、再度乳房をマッサージし搾乳を行ってください。
9. 集乳ボトルがあふれないように注意してください。  
ボトル上部に表示してある線までミルクを入れてください。  
ミルクが空気抜きの穴に流入しないように、ボトルを決して傾げずに垂直に保つて下さい。
10. 集乳したミルクボトルに乳首を付けて子牛に与える、もしくはキャップをして凍結保存をしてください。この際忘れずに母牛の名号と集乳日をラベルに記載してください。

## ■洗浄方法



1. 使用後に毎回必ず洗浄してください。各パーツは簡単に取り外せるので、容易に洗浄できます。



2. 搾乳シリンダーと集乳ボトルは毎回使用後暖かい洗浄液に浸してください。洗浄液には消毒剤か洗浄剤もしくは少量の塩素殺菌剤か漂白剤（水 1 対し漂白剤 1 以下の割合）を加えてもよいでしょう。その後充分にすすぎ、乾かしてください。ポンプハンドル部分は洗浄布などで拭いてください。

### 注：



1. 集乳ボトルは絶対に煮沸しないでください。皿洗い機で洗浄しないでください。集乳ボトル洗浄後、O リングのパッキンを忘れずに付けてください。


2. もしミルクがポンプの中に入った場合は…  
すぐに洗浄を行ってください。

真空口を少なめの石鹼液か pH7-8 の洗浄液に浸してください。洗浄液を、ポンプの中へ、ハンドルを操作して吸入させて、中に入ったミルクを完全に排除してから、外部を布でふき取り、内部は空気を送って乾かしてください。

3. ミルクで汚れたままのポンプを、一晩放置したり、長時間洗浄せずに放置したりしないでください。特に初乳はべたついており、ポンプのパーツを痛める可能性が非常に高いため、スプーン 2 杯分の重曹をぬるま湯に溶かして、ポンプを操作し、よくすすいで乾かしてください。

### 4. 凍結初乳の解凍方法

初乳中の抗体を破壊するので、解凍に電子レンジを絶対使わないでください。初乳の入ったボトルを温水に浸し、ゆっくり解凍してください。

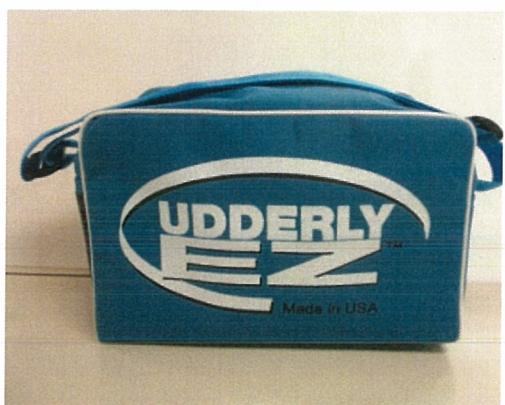

輸入総代理店：

(株)野澤組畜産部

本社 : 100-0005 東京都千代田区丸の内 3-4-1(新国際ビル)

TEL: 03-3216-3476 FAX: 03-3216-3578

札幌 : 〒060-0003 札幌市中央区北3条西3-1-4(札幌北三条ビル)  
TEL : 011-221-3323 FAX : 011-251-7527

九州 : 〒862-0954 熊本県熊本市神水 2-10-7(光永ビル 403)

TEL: 096-381-3914 FAX : 096-381-3841