


Dojička UDDERLY EZ™

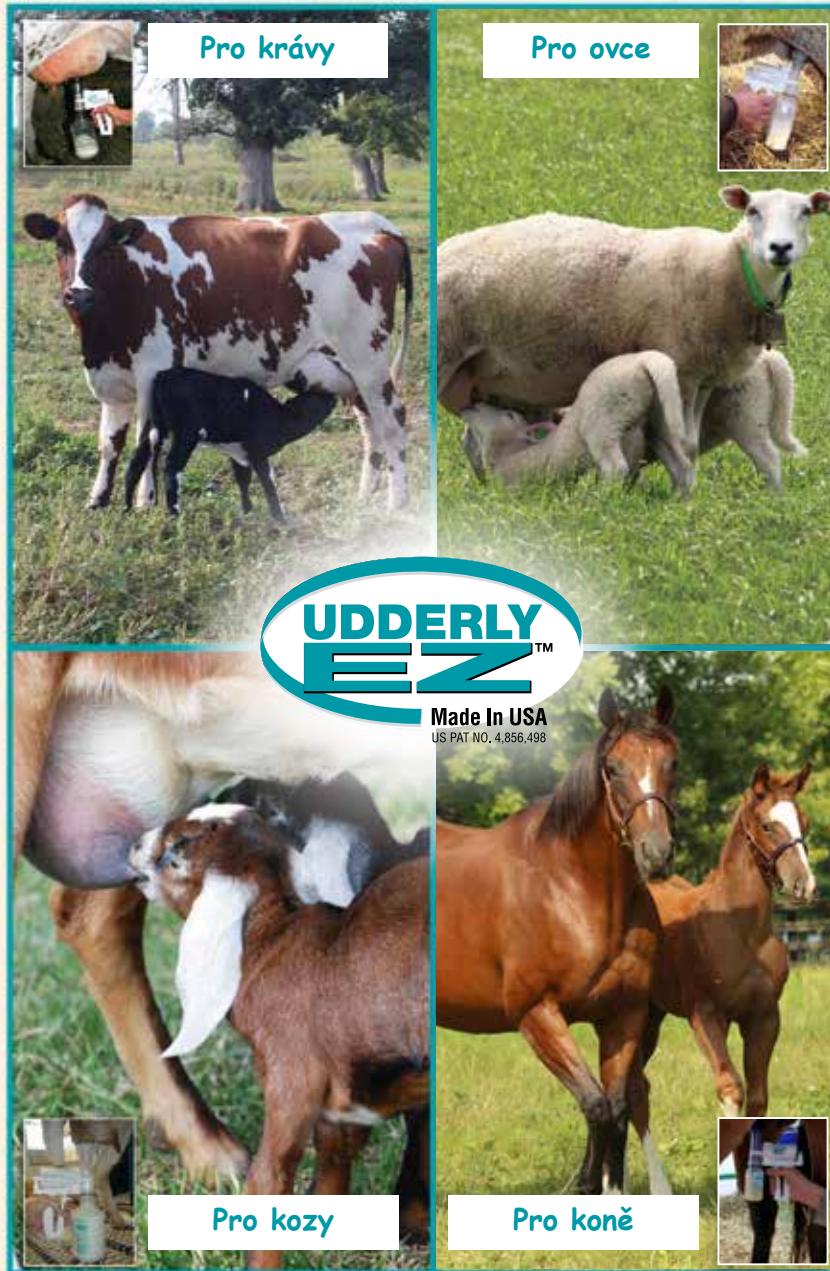

Videa/návody pro
krávy-kozy-ovce

Produktová videa /
návody pro koně

Navštivte naše stránky a zhlédněte online živá video

[youtube.com/udderlyez1](https://www.youtube.com/udderlyez1)

Bezplatná linka: 1-800-287-4791

Telefon: 515-332-1782

info@udderlyez.com

www.udderlyez.com

Mobilní telefon: 859-368-9509

* Než produkt začnete používat, přečtěte si prosím podmínky vrácení zboží na zadní straně.

Gratulujeme ke koupi dojičky UDDERLY EZ MILKER! Můžete se těšit na vynikající výkon a spolehlivost při získávání mléka a mleziva pro:

- krmení novorozených zvířat
- odběr mléka nebo mleziva od matky novorozeného zvířete či jiné matky pro okamžité použití
- odběr mléka nebo mleziva od matky novorozeného zvířete nebo jiné matky pro účely skladování v mléčné bance / bance na mlezivo a pravidelné kojení zvířat

To vše lze provádět velmi jednoduše a bezpečně. Postupujte podle jednoduchých kroků montáže a provozu DOJIČKY UDDERLY EZ MILKER.

SNADNÁ MONTÁŽ

1. Než přistoupíte k dojení, přečtěte si tento návod.
2. Zarovnejte zúžený konec konektoru láhve s otvorem pro vložení na pumpě a propojte je. Zavaknou do sebe.
3. Našroubujte na válec čírou plastovou láhev s pryžovým těsnicím kroužkem. Aby nedošlo k úniku vzduchu, našroubujte těsně.



Nově upravené díly pro obě dojičky Ez Milker



Na obrázku je použita velká odsávačka na krávy



Na válec č. 2 pasují všechny tři velikosti odsávaček.



Na obrázku je silikonová odsávačka na ovce a kozy a láhev o objemu 236 ml (8 uncí)

4. Uchopte pumpu a nasuňte upínky konektoru láhve mezi vodicí spoje na sběrném válci. Zavaknou do sebe.
5. Jako preventivní opatření jemně zmáčkněte válec a pumpu k sobě, abyste zajistili, že na sobě dobře sedí.
6. Namiřte ústí extraktoru do své dlaně a zapumpujte, abyste se ujistili, že pumpa vytváří dostatečný podtlak. Pokud podtlak není vytvářen, opakujte kroky 2 a 4 výše.

Extrakční válce dojičky Udderly EZ mají jednu velikost – číslo 2. Silikonové odsávačky jsou barevně odlišeny a dodávány ve 3 velikostech. Všechny pasují do válce č. 2 z tvrdého plastu. Malé odsávačky jsou určeny pro mladé klisny, lamy, ovce, kozy dobytek atd. Střední odsávačky jsou určeny pro středně velké struky a velké odsávačky pro velké struky krav, velbloudů a kobyl. Většinu našich sad dodáváme s odsávačkami malé a střední velikosti. Pokud požadujete další velikost, objednejte si ji navíc v rámci jedné objednávky. (Doporučujeme mít po ruce všechny tři velikosti, abyste se přizpůsobili velikosti struk vašeho zvířete.)


Upozornění: Ujistěte se, že silikonová odsávačka (vložka) je v extrakční trubce č. 2 pevně usazená. Aby pevně seděla na horní části plastové trubky, mírně ji nakloňte přes horní část plastové trubky a zatlačte směrem dolů směrem k druhé straně.

ČIŠTĚNÍ DOJIČKY UDDERLY EZ MILKER

Dojičku po každém použití co nejdříve vyčistěte. Část dojičky s pumpou lze snadno připnout a odepnout, co umožňuje snadné čištění jednotlivých součástí dojičky. Po každém použití by měl být sběrný extrakční válec a sběrná plastová láhev ponořeny do teplé vody s čisticím roztokem. Můžete přidat také dezinfekční či sanitační prostředek nebo malé množství čističe s obsahem chloru nebo bělidla (nepřesahujte poměr 1 (bělidlo) ku 10 dílům vody). Vyčistěte a DŮKLADNĚ OPLÁCHNĚTE a nechte uschnout. Vnější povrch dojičky můžete očistit s pomocí ubrousů Udderly EZ Wipes (**POZNÁMKA: Plastové sběrné láhve nepřevařujte. Vařící voda by je poškodila a byly by nepoužitelné. Převařování je při správné dezinfekci zbytečné. LÁHVE NIKDY NEMYJTE V MYČCE NÁDOBÍ.**)

Po čištění nezapomeňte černý těsnicí kroužek vrátit na okraj sběrných lahvi.

DOJIČKA UDDERLY EZ NEBUDE BEZ TĚSNICÍHO KROUŽKU FUNGOVAT.

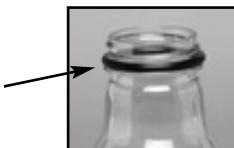

ČIŠTĚNÍ PUMPY V PŘÍPADĚ VNIKU MLEZIVA

Pokud se do pumpy dostane mlezivo nebo mléko, je nutné jej co nejdříve vyčistit. Celou pumpu ponořte do teplé jemné mýdlové vody nebo čisticího roztoku (pH 7–8), přidejte čtyři až šest polévkových lžic jedlé sody a přečerpejte je pumpou. Poté proces opakujte s teplou čistou vodou, přečerpejte ji přes pumpu, vytlačte vodu, vytřepalte ji a vysajte pumpou vzduch, abyste pumpu zevnitř vysušili. Otřete a nechte uschnout. Pokud byla pumpa znečištěno mlezivem nebo mlékem, nikdy ji nenechejte nevyčištěnou přes noc nebo po delší dobu. Kolostrum je velmi husté a lepkavé a pokud jej necháte usadit, může pumpu zničit.

NA PUMPU NIKDY NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL NEBO PRODUKTY NA BÁZI ALKOHOLU!

ROZMRAZENÍ ZMRZLÉHO MLEZIVA

Na rozmrazení zmrzlého mleziva nikdy nepoužívejte mikrovlnnou troubu, zničila by protilátky. Láhev s mlezivem vložte do mýsy s teplou vodou a nechte pomalu roztát.

EXTRAKCE MLÉKA NEBO MLEZIVA

OVCE



KRÁVY




KONĚ



KOZY



1. Oblast vemene vždy vyčistěte s pomocí ubrousků Udderly EZ, které jsou dodávány se sadou, abyste odstranili nahromaděnou špínu a bakterie.
2. Jemně odstraňte voskovou zátku z konce struku, aby nespadla do láhev.
3. Ručně podojte každý struk alespoň dvakrát, abyste dosáhli dobrého průtoku mléka. Tímto odstraníte veškeré bakterie, které mohou být přítomné.
4. Umístěte silikonovou odsávačku přímo přes struk a jemně zvedněte pumpu směrem k vemenu.
5. Zmáčkněte rukojeť alespoň 2–3krát, čímž zahájíte proces vakuového utěsnění a pumpu přisajete k vemenu zvířete. Nyní nechte láhev klesnout směrem dolů, zatímco uvolňuje podtlak a působí na ni gravitace.
6. Jakmile začne proudit mléko, přestaňte pumpovat. Když se průtok zpomalí, začněte znova pumpovat. Tento postup může být nutné opakovat 3–4krát.
7. Abyste snížili podtlak pumpy, zatlačte láhev dozadu směrem ke spoušti, čímž podtlak uvolníte. Pumpu z vemenu nesundávejte.
8. Při prvním dojení obvykle vydojíte 230–350 ml mleziva, ale to se může u jednotlivých druhů či plemen zvířat lišit.
9. Pokud matka mléko okamžitě nevypustí, může být nutné, abyste jí vemeno jemně promasírovali. Natlačte celou pumpu a láhev směrem do vemene (jako když dítě při kojení narází hlavou do prsu matky) a nechte láhev vlastní hmotností klesnout. Při tom dejte pozor, abyste neporušili vakuové těsnění. Pumpa uvolní podtlak a působí na ni gravitace.
10. Sběrnou láhev nepřeplňujte. Naplňte ji pouze po značku uvedenou na láhvích. Pumpu nikdy nenaklánějte dozadu. Tím by se mléko nebo mlezivo dostalo do otvoru pro nasávání vzduchu a poškodilo membránu v pumpě.
11. Nasaděte pryžovou malou savičku přímo na láhev o objemu 236 ml (8 uncí), případně velkou savičku s našroubovaným kroužkem na láhev o objemu 532 ml (18 uncí) a nakrmte čerstvě narozené mládě. Všechny naše láhve lze používat v mrazničce, stačí nasadit víčko a láhev vložit do mrazničky. **NEREZMRAZUJTE V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, ZNIČILY BY SE PROTILÁTKY!**

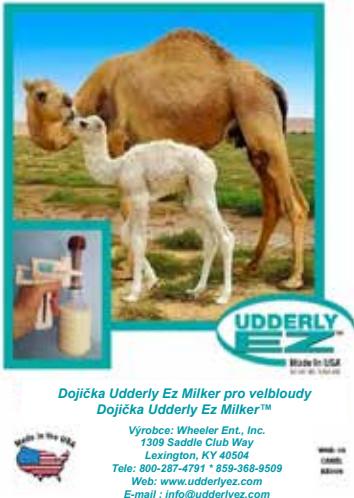

DOJIČKA UDDERLY EZ CAMEL PRO VELBLOODY

Dojička Udderly Ez Camel pro velbloudy byla vyzkoušena na velbloudech ve Spojených arabských emirátech a ve 4 zařízeních pro dojení velbloudů v USA. Nabízíme také elektrickou dojičku Ultimate Ez Electric Milker a tři barevně odlišené silikonové odsávačky, které pasují na všechny velikosti struků.

www.udderlyez.com Další informace a celou řadu videí naleznete na našem:
www.youtube.com/udderlyez1

SBĚRNÉ LÁHVE UDDERLY EZ™ NA MLEZIVO/MILÉKO

Speciálně navržené sbeřné láhve na mlezivo o objemu 236 ml (8 uncí), 532 ml (18 uncí) nebo 946 ml (1 kvartu) v čirém plastovém provedení, včetně těsnícího kroužku, aby byl při připojení k dojíčce Udderly EZ zajištěn podtlak. Víčko je opatřeno nepropustnou těsnicí vložkou. Ideální pro zamrazení mleziva a uložení pro budoucí použití nebo pro přelití mleziva do kojící lávě k okamžitému použití.



236ml láhev na mlezivo
#EZ814



Dvojbalení lahví o objemu 532 ml #EZP02



Dvojbalení o objemu 946 ml
#EZ002

Děkujeme, že jste si zakoupili DOJÍČKU UDDERLY EZ MILKDER, nejbezpečnější a nejúčinnější prostředek pro dojení mléka a mleziva velkých domácích a exotických zvířat. Tuto dojičku lze použít na koně, poníky, ovce, kozy, lamy, alpaky, zebrý, velbloudy a krávy. Udderly EZ je také nejúčinnější ruční produkt na dojení na trhu. Tuto patentovanou vakuovou pumpu vyrábíme pouze z plastů té nejvyšší kvality podle přísných státních norem kvality pro zdravotnické prostředky. Na všechny lávhe se vztahuje záruka úřadu FDA na kopolysterové čiré nádoby. Všechny lávhe jsou vyrobeny konkrétně podle specifikací použití dojičky Udderly EZ Milker. Jsou vyrobeny z čirého kopolymeru a splňují požadavky na složení a inherentní viskozitu stávajících nařízení úřadu FDA Spojených států amerických, které uvádí 21 CFR 177.1315 a které platí pro všechny potravinové výrobky.

Poskytujeme osvětu a vzdělávání ohledně naší dojíčky Udderly EZ™ Milker, včetně bezplatného instruktážního DVD.

JV případě jakýchkoli otázek ohledně tohoto produktu nebo pokud máte pochyby o jeho vhodnosti pro vaše použití **SE OBRAŤTE NA SVÉHO VETERINÁŘE.**

Následující text nahrazuje veškeré záruky, vyjádřené nebo podložené, prodejem produktu. Prodejce a výrobci jsou povinni vyměnit pouze takové množství produktu, který je prokázán vadným. Ani prodejce, ani výrobce nenesou podle právní teorie odpovědnost vůči uživateli či jakékoli jiné osobě, včetně mimo jiné za nedbalost nebo objektivní odpovědnost za jakékoli přímé nebo následné škody vzniklé nebo způsobené z důvodu použití produktu nebo jinak. Před použitím musí uživatel stanovit vhodnost produktu pro zamýšlené použití a uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost s tím spojená. Výše uvedené může být měněno pouze pracovníky prodejce a výrobců.

REKLAMACNÍ ŘÁD: Společnost Wheeler Enterprises Inc. dba EZ Animal Products provede výměnu veškerých dílů nebo pumpý Udderly EZ, u nichž bude prokázána výrobní vada, a to do 30 dnů po obdržení nákupu a při použití v souladu s přiloženým návodem. Objevnávky si vždy překontrolujte.

UDDERLY EZ™

DOJIČKA KOŇŮ, OVCÍ, KOZ, KRAV, VELBLOUDŮ A EXOTICKÝCH ZVÍŘAT

(Produkty vyrábí výhradně společnost Wheeler Enterprises, Inc.)



VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR PRO:
SLOVENSKO, ČESKOU REPUBLIKU A POLSKO

WALDOS s.r.o. **

Address: Limbova 3057/1601007 Žilina, Slovakia EU

Address: Limbová 305 // 16010
Contact: Marták Milan MVDr.

Contact: Martak Milah MVL
Tel :+421(0)944529854

Tel.: +421(0)94452985
www.waldos.sk

www.waldos.sk
info@waldos.sk

„Děkujeme všem uživatelům dojičky Udderly Ez Milker™ z více než 70 zemí z celého světa. V červnu 2021 byla naše dojička UEZ Milker uvedena v 2. vydání textového manuálu Equine Reproductive Procedures (Postupy reprodukce koní) pro veterinární studenty, veterináře a odborníky.“

Buck Wheeler
prezident / výkonný ředitel,
vlastník, vynálezce, Mfg
EZ Animal Products

