


Dojarka dla zwierząt UDDERLY EZ™

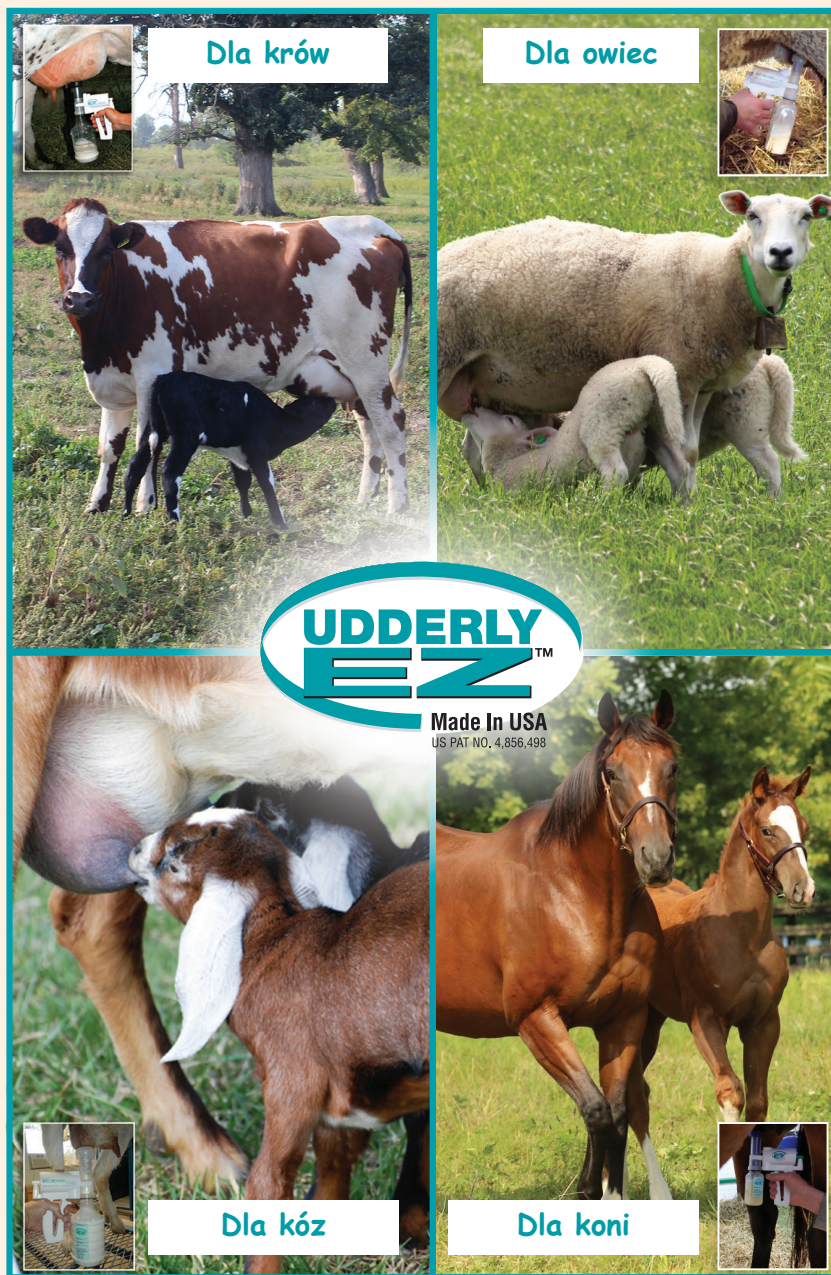

Krowy-Kozy-Owce
Filmy wideo/
instrukcje



Produkty dla koni
Filmy wideo/
instrukcje

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby obejrzeć filmy wideo na żywo online

youtube.com/udderlyez1

info@udderlyez.com

Bezpłatny numer: 1-800-287-4791

www.udderlyez.com

Tel.: 515-332-1782

Kom.: 859-368-9509

* Przed użyciem sprzętu przeczytaj zasady zwrotu z tyłu

Gratulujemy zakupu DOJARKI UDDERLY EZ! Zapewni Ci ona doskonałą wydajność i niezawodność w ekstrakcji mleka i siary do:

- karmienia noworodka
- pobierania mleka lub siary od matki noworodka lub karmiącego zwierzęcia do natychmiastowego użycia
- pobierania mleka lub siary od matki noworodka lub karmiącego zwierzęcia do przechowywania w banku mleka/siary i regularnego dojenia zwierząt

Wszystkie powyższe czynności można wykonać przy minimalnym wysiłku i dużym stopniu bezpieczeństwa. Proszę postępować zgodnie z tymi prostymi krokami w procedurach montażu i obsługi DOJARKI UDDERLY EZ.

MONTAŻ EZ

1. Przeczytaj tę instrukcję przed rozpoczęciem dojenia.
2. Wyrównaj stożkowy koniec łącznika butelki z otworem wlotowym w pompce i połącz oba elementy; części zablokują się razem.
3. Przykręć przezroczystą plastikową butelkę z gumowym pierścieniem uszczelniającym do cylindra; musi być ciasno dopasowana, aby zapobiec wyciekowi powietrza.

OSTRZEŻENIE: NIE przykręcaj butelek do zbierania mleka na rurki zbiorcze, gdy rurki są przymocowane do łącznika pompki. Dokręcanie butelki, gdy ekstraktor jest przymocowany do pompki, powoduje nadmierny nacisk na części i może uszkodzić zaciski. **NAJPIERW** przykręć butelki do zbierania mleka na rurki zbiorcze, a następnie podłącz je do pompki.

4. Chwyc pompkę i wsuń zaciski łącznika butelki pomiędzy grzbiety prowadzące na cylindrze zbiorczym; części zablokują się razem.
5. Jako środek ostrożności delikatnie dościsnij do siebie cylinder i pompkę, aby zapewnić solidne osadzenie obu jednostek.
6. Umieść otwór ekstraktora na spodzie dłoni przy podstawie kciuka i pompuj, aby upewnić się, że pompka wytwarza niezbędne podciśnienie. Jeśli podciśnienie nie zostanie wytworzone, powtórz kroki 2 i 4 powyżej.

Cylindry do ekstrakcji mleka i siary Udderly EZ są dostępne w jednym rozmiarze nr 2.

Silikonowe gumy strzykowe są oznaczone kolorami i występują w 3 rozmiarach.

Wszystkie pasują do twardego plastikowego cylindra nr 2. Małe, aby zmieścić małe lub pierworódki klacze, lamy, owce, kozy, krowy itp. Średnie dla starszych, średniej wielkości strzyków i duże dla dużych strzyków u krów, wielbłądów i klaczy. Większość naszych zestawów jest wysyłana z gumami strzykowymi w rozmiarze małym i średnim, jeśli potrzebny jest dodatkowy rozmiar, należy go zamówić w momencie wysyłki (dobrze jest mieć wszystkie trzy pod ręką na wypadek, gdyby potrzebny był inny rozmiar).

Uwaga: Upewnij się, że silikonowa wkładka jest bezpiecznie osadzona w rurce ekstraktora nr 2. Lekko przechyl ją nad górną częścią plastikowej tuby i dociśnij w dół w kierunku drugiej strony, a będzie ściśle przylegać do górnej części plastikowej tuby.

CZYSZCZENIE DOJARKI UDDERLY EZ

Wyczyść dojkę tak szybko, jak to możliwe po każdym użyciu. Część pompowa dojkarki łatwo się zatrzaskuje i odłącza, co pozwala na łatwe czyszczenie części dojkarki. Po każdym użyciu cylinder zbiorczy do ekstrakcji i plastikowa butelka zbiorcza powinny zostać zanurzone w ciepłej wodzie z roztworem czyszczącym. Możesz dodać środek dezynfekujący lub odkażający lub niewielką ilość chlorowanego środka czyszczącego lub wybielacza (nie więcej niż 1 część wybielacza na 10 części wody). Wyczyść i **DOKŁADNIE SPLUCZ** i pozostaw do wyschnięcia. Możesz wyczyścić całą zewnętrzną część dojkarki za pomocą chusteczek Udderly EZ

Wipes (**UWAGA: Nigdy nie gotuj żadnych plastikowych butelek zbiorczych. Gotowanie je rozhartuje i sprawi, że staną się bezużyteczne. Gotowanie jest zbędne przy odpowiedniej dezynfekcji. NIGDY NIE MYJ BUTELEK W ZMYWARCE.**)

Należy pamiętać, że po czyszczeniu należy ponownie założyć czarny pierścień uszczelniający na krawędź butelki zbiorczej.

DOJARKA UDDERLY EZ NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ PIERŚCIENIA USZCZELNIAJĄCEGO.

CZYSZCZENIE POMPKI, JEŚLI SIARA DOSTAŁA SIĘ DO ŚRODKA

W przypadku dostania się siary lub mleka do zespołu pompki, należy wyczyścić go tak szybko, jak to możliwe. Zanurz całą pompkę w ciepłej wodzie z mydłem lub roztworze czyszczącym o pH 7-8, dodaj cztery do sześciu łyżek sody oczyszczonej i przepompuj przez pompkę. Następnie powtórz proces z ciepłą, czystą wodą, przepompuj ją przez pompkę, wypuść wodę, wytrząśnij ją i zassij powietrze przez pompkę, aby pomóc wysuszyć ją wewnątrz, wytrzyj i pozostaw do wyschnięcia. Nigdy nie pozostawiaj pompki na noc lub na dłuższy okres czasu, jeśli została zanieczyszczona siarą lub mlekiem. Siara jest bardzo gęsta i lepka i może zniszczyć zespół pompki, jeśli pozwoli się jej się ustalić.

NIGDY NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI PRODUKTÓW NA BAZIE ALKOHOLU W TEJ POMPCE!

ROZMRAŻANIE ZAMROŻONEJ SIARY

Nigdy nie używaj kuchenki mikrofalowej do rozmrażania zamrożonej siary, ponieważ zniszczy ona przeciwciała. Umieść butelkę z siarą w misce z ciepłą wodą i pozwól jej powoli się rozmrozić.



Nowe, zaktualizowane części do obu dojarek Ez



Pokazano z dużą gumą strzykową do mleka krowiego



Wszystkie trzy rozmiary gum strzykowych pasują do cylindra nr 2.



Pokaz z silikonową pompką w dla owiec i kóz oraz butelką 8 uncji



PROCES EKSTRAKCJI MLEKA LUB SIARY

OWCE



KROWY




KONIE



KOZY



1. Zawsze oczyść obszar wymienia za pomocą chusteczek Udderly EZ Wipes dołączonych do zestawu, aby usunąć wszelkie nagromadzone zanieczyszczenia i bakterie.
2. Delikatnie usuń korek woskowy z końca strzyka, aby nie wpadł do butelki.
3. Ręcznie przetrzyj każdy strzyk co najmniej dwa razy, aby rozpocząć dobry przepływ mleka. To usunie wszelkie bakterie, które mogą być obecne.
4. Umieść silikonową gumę strzykową bezpośrednio na strzyku i delikatnie unieś pompkę w kierunku wymienia.
5. Ściśnij uchwyt co najmniej 2-3 razy, rozpocznie to proces uszczelniania próżniowego, blokując jednostkę na wymieniu zwierzęcia. Teraz pozwól butelce opaść, ponieważ działa ona pod wpływem podciśnienia i grawitacji.
6. Gdy tylko zacznie płynąć mleko, przestań pompować! Gdy przepływ zwolni, zacznij pompować ponownie. Może być konieczne powtórzenie tej sekwencji 3-4 razy.
7. Aby zwolnić podciśnienie w pompce, przesun butelkę do tyłu w kierunku spustu ręcznego, aby zwolnić blokadę podciśnienia. Nie ściągać pompki z wymienia.
8. Podczas pierwszego dojenia zazwyczaj zbiera się od 8 do 12 uncji siary, chociaż może się to różnić w zależności od gatunku lub rasy zwierzęcia.
9. Jeśli matka nie spuści mleka natychmiast, może być konieczne delikatne masowanie jej wymion, aby rozpocząć przepływ. Wsuń całą pompkę i butelkę do worka (jak niemowlę, które przytula mamę podczas karmienia piersią) i pozwól, aby ciężar opadł z powrotem, uważając, aby nie uszkodzić uszczelki próżniowej. Pompka działa na zasadzie podciśnienia i grawitacji.
10. Nie przepelniaj butelki zbiorczej, napełniaj tylko do wskazanej linii na butelce. Nigdy nie przechylaj pompki do tyłu. Spowoduje to, że mleko lub siara przedostaną się do otworu wlotowego powietrza i uszkodzą membranę w pompce.
11. Umieść mały smoczek gumowy bezpośrednio w butelce o poj. 8 uncji lub duży smoczek z pierścieniem przykręconym do butelki o poj. 18 uncji i podawaj bezpośrednio noworodkowi. Wszystkie nasze butelki można bezpiecznie zamrażać, wystarczy nałożyć zatyczkę i umieścić je w zamrażarce. **NIE ROZMRAŻAJ W MIKROFALÓWCE!! ZNISZCZY TO PRZECIWCIAŁA!!**

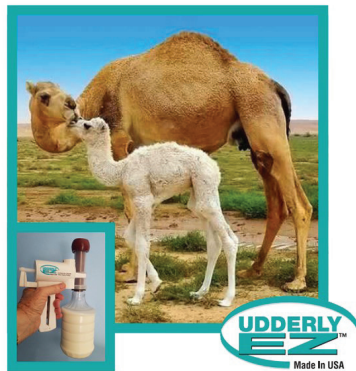

Dojarka Udderly Ez dla wielbłądów
Dojarka Udderly Ez Milker™



Wyprodukowana przez Wheeler Ent., Inc.
1309 Saddle Club Way
Lexington, KY 40504
Tel.: 800-287-4791 • 505-368-9509
Strona internetowa: www.udderlyez.com
E-mail: info@udderlyez.com

WHE-10
CAMEL
EZ2006



DOJARKA UDDERLY EZ CAMEL
Dojarka Udderly Ez Camel była używana u wielbłądów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w 4 obiektach do dojenia wielbłądów w USA. Mamy również dojarkę Ultimate Ez Electric, posiadającą trzy oznaczone kolorami silikonowe gumy strzykowe, które pasują do wszystkich rozmiarów strzyków.

Więcej informacji i pełną ofertę filmów znajdziesz na stronie www.udderlyez.com

PRZEJDŹ DO:

www.youtube.com/udderlyez1

BUTELKI DO ZBIERANIA SIARY/MLEKA UDDERLY EZ™

Specjalnie zaprojektowane przezroczyste plastikowe butelki do zbierania siary o pojemności 8 uncji, 18 uncji lub 1 kwarty z gumowym pierścieniem uszczelniającym na górze, aby zapewnić próżnię po przymocowaniu do dojarki Udderly EZ. Nakrętka ma szczelną uszczelkę. Idealne do zamrażania siary i przechowywania do przyszłego użytku lub do przelewania siary do butelki do karmienia w celu natychmiastowego użycia.



Butelki z siarą 8 uncji
#EZ814



2 opakowania butelek 18 uncji
#EZP02



2 opakowania butelek 1 kwarta
#EZQ02

Dziękujemy za zakup DOJARKI UDDERLY EZ, najbezpieczniejszego i najskuteczniejszego urządzenia do zbierania mleka i siary od dużych zwierząt domowych i egzotycznych. Można go używać u koni, kucyków, owiec, kóz, lam, alpак, zeb, wielbłądów i krów. Udderly EZ jest również najskuteczniejszym ręcznym produktem do dojenia na rynku. Ta opatentowana pompka próżniowa jest produkowana wyłącznie z najwyższej jakości tworzyw sztucznych i montowana zgodnie z surowymi rządowymi normami kontroli jakości dla wyrobów medycznych. Wszystkie butelki posiadają gwarancję FDA na przezroczyste pojemniki z kopoliestru. Wszystkie butelki są produkowane specjalnie zgodnie ze specyfikacjami do stosowania w dojarkę Udderly EZ. Są wykonane z przezroczystego kopoliestru i spełniają wymagania dotyczące składu i lepkości wewnętrznej obowiązujących przepisów amerykańskiej agencji FDA w 21 CFR 177.1315 dla wszystkich produktów spożywczych.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby poinstruować, wyedukować i wyjaśnić działanie naszej dojarki Udderly EZ™, udostępniając także bezpłatną płytę DVD z instrukcją.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu lub masz wątpliwości co do jego przydatności do Twojego celu, **SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARI**

Poniższe postanowienia zastępują wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane: Sprzedawca i producent są zobowiązani wyłącznie do wymiany takiej ilości produktu, która okazała się wadliwa. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby na podstawie teorii prawnej, w tym między innymi zaniedbania lub ścisłej odpowiedzialności, za jakiegokolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody poniesione lub powstałe z powodu użytkowania produktu lub w inny sposób. Przed użyciem użytkownik określi przydatność produktu do zamierzonego zastosowania, a następnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Powyższe postanowienia nie mogą zostać zmienione przez osoby trzecie z wyjątkiem pracowników sprzedawcy i producenta.

POLITYKA ZWROTÓW: Wheeler Enterprises Inc. dba EZ Animal Products wymieni wszelkie części Udderly EZ lub pompkę, które okażą się wadliwe w produkcji w ciągu 30 dni od otrzymania paragonu zakupu, jeśli będą używane zgodnie z załączoną instrukcją. Prosimy o przemyślane składanie zamówień.

UDDERLY EZ™

DOJARKA DLA KONI, OWIEC, KÓZ, KRÓW, WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT EGZOTYCZNYCH

(Produkty wytwarzane wyłącznie przez Wheeler Enterprises, Inc.)



WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR DLA:
SŁOWACJI, REPUBLIKI CZESKIEJ I POLSKI
WALDOS s.r.o.**
Address: Limbova 3057/1601007 Žilina, Slovakia, EU
Contact: Marták Milan MVDPr.
Tel.: +421(0)944529854
www.waldos.sk
info@waldos.sk

„Dziękujemy wszystkim naszym licznym użytkownikom dojarki Udderly Ez™ w ponad 70 krajach na całym świecie. W czerwcu 2021 r. Nasza dojarka UEZ została uwzględniona w 2. wydaniu podręcznika Equine Reproductive Procedures dla studentów weterynarii, lekarzy weterynarii i profesjonalistów”.

Buck Wheeler
Prezes/CEO
Właściciel, Wynalazca, Mfg
produktów dla zwierząt EZ

