



PLOTKA GŁOSI, ŻE STABLEIZER® MA IDEALNY SENS!

„Stableizer” to najlepsze narzędzie, z jakim się spotkałem, służące do ochrony zwierzęcia i ułatwiające obchodzenie się z nim. Zabieramy z nim wszystkie konie na padok; kiedyś zabieraliśmy je wszystkie na łańcuskach wędzidłowych, ale Stableizer® jest lepiej regulowany i przewidywalny! Naprawdę pomaga im się skupić.”



~ Carl Nafzger
Hall of Fame czystej krwi
i trener Eclipse Award

“Oceniając dokładną konstrukcję tego urządzenia, odkryłem, że plastikowa rurka chroniąca dziąsła i okolice głowy, całkowicie atraumatyczna, wywierała nacisk na punkty akupunkturalne G.V.26 i T.H.



Chwila z doktorem Cainem i Unbridled, zwycięzcą Kentucky Derby z 1990 roku i wyjątkowym pacjentem.

„G.V.26 (znajdujący się na górnym dziąśle pomiędzy dwoma przednimi zębami i pod górną wargą) jest punktem uwalniającym po stymulacji adrenaliny, natomiast stały nacisk lub nadmierna stymulacja powoduje blokadę i następujący po niej efekt uspokajający. Kolorowa plastikowa opaska na głowę z „guzkami” umieszczonymi po obu stronach pod uchem skierowana jest na punkt T.H. 17, który działa uspokajająco po stymulacji, powodując wydzielanie endorfin, które mają działanie uspokajające lub nasenne. To trochę jak pocieranie psa lub kota za i pod uchem, co wywołuje stan euforii. Działanie typu „pociągnij i puść” zapewnia efekt stymulujący w tym punkcie, a

następnie pożądaną rezultat.

„Chociaż pożądane „przytrzymanie” zostaje osiągnięte, koń jest poddawany „przyjemności”, a nie „bólowi”, najbardziej zadziwiające jest to, że gdy tylko nastąpi początkowe „odwrażliwienie”, to odczucie pozostaje. To nie jest tak, jak w przypadku Ace promozine, Torbugisec, Rompun itp., które przestają działać i w trakcie tego procesu nie pozostawiają trwałej pamięci. Umożliwia to operatorowi przeprowadzanie zabiegów w sposób akceptowalny dla konia, bez tworzenia złych wspomnień komórkowych, gdy zabieg trzeba będzie wykonać ponownie, a także pozwala koniowi zapamiętać przyjemne skojarzenie z każdym wykonanym zabiegiem lub zadaniem treningowym.”

Marvin C. Cain D.V.M.

Mistrz akupunktury, wykładowca, autor

STREET SENSE
2006 Eclipse Award Winning
Champion 2-latek Colt x
2006 Breeders' Cup Juvenile Winner
2007 Kentucky Derby Winner
2007 Travers Stakes Winner
2007 Jim Beam Stakes Winner



Zdjęcie z Equisport



„Whistlejacket Equine Surgery rutynowo używa systemu Stableizer® i stwierdziło tam, że jest on bardzo skuteczny w stosowaniu zamiast dutki. Jest szczególnie przydatny w przypadku prostych zabiegów, takich jak pobieranie krwi od żrebiąt, tarcikowanie zębów, blokada nerwów i endoskopia. W przeciwieństwie do szarpania konia, które czasami może mieć nieprzewidywalne skutki, urządzenie Stableizer® jest niezawodne i zapewnia skuteczną kontrolę nad pacjentem.”

~ Oliver C. Davis, M.R.C.V.S., Whistlejacket Equine Surgery Middle Farm Stable, Poundbury, Dorchester, Dorset, Anglia

Nacisk jest kontrolowany poprzez naciśnięcie czerwonego przycisku, który jest sprężynowy i służy do ustawiania naciągu na linkach systemu Stableizer®. Jego funkcją jest przytrzymanie konia sportowego i jednocześnie umożliwienie prowadzenia, trzymania, siodłania, obciążenia, jazdy lub trenowania konia, czego nie potrafią zrobić inne rodzaje urządzeń przytrzymujących.

Podczas wywierania tego nacisku Stableizer® odwraca uwagę konia od innych części ciała. Dowody wskazują, że endorfiny i powiązane związki są uwalniane przez zastosowanie ciśnienia drgania w centrach nerwów czuciowych. Endorfiny i powiązane związki to substancje narkotyczne wytwarzane i uwalniane z ośrodkowego układu nerwowego, a blokowały ból z innych części ciała, powodując rozluźnienie konia.

W testach terenowych stwierdzono, że Stableizer® działa u większości koni za pierwszym razem. Jednak niektóre konie mogą wymagać dwóch lub więcej zastosowań, zanim staną się całkowicie podatne na jego działanie.

JAK ZAKŁADAĆ I STOSOWAĆ STABLEIZER®

Wykonaj te sześć (6) prostych kroków

(Identyfikacja części znajduje się na stronie 3, P-5)

Krok nr 1: Naciśnij czerwony przycisk zwalniania naciągu (A) i przesun w dół w kierunku uchwytu (B). Dzięki temu zyskasz więcej miejsca na głowę podczas zakładania na głowę konia. Przelóż głowę konia przez Stableizer® i po ustawieniu górnej części zatrzasku (G) pod lewym uchem przenieś dolną lub plastikową rurkę pod szczękę i umieść ją pod górną wargą (*odwrotnie niż przy zakładaniu wędzidla*). (Zobacz zdjęcie P-1)

Krok nr 2: Upewnij się, że plastikowa rurka (C) jest wsunięta do końca do aluminiowej tulei (D) i dolnego bloczka (H). Podczas nakładania systemu Stableizer® zawsze pracuj po lewej stronie konia, tak jak podczas zakładania ogłowia. Zawsze sprawdzaj przed użyciem, czy plastikowa rurka nie ma pęknięć lub złamań.

Krok nr 3: Umieść powlekany kolorowy kabel (E) nad głową tuż za potylicą i uszami, umieszczając górę zatrzasku (G) tam, gdzie łączy się z kablem tuż pod lewym uchem (w tym małym otworze) (*patrz zdjęcie P-1*). Lewą ręką umieść spód systemu Stableizer® (z plastikową rurką) trzymając między lewym kciukiem a lewym środkowym palcem w górę i pod górną wargą. W tym momencie, jeśli Stableizer® musi zostać powiększony lub zmniejszony, zobacz (**Regulacje na czerwono**) Strona 3, P-6.

Krok nr 4: Umieść ją pod górną wargą, jednocześnie powoli ciągnąc w dół prawą ręką i usuwając luz z systemu Stableizer®. Gdy plastikowa rurka znajdzie się pod górną wargą, przelóż uchwyt (B) z prawej ręki do lewej, naciśnij i przesun czerwony przycisk kontroli naciągu (A) prawą ręką aż do górnej części bloczka (F) (*patrz zdjęcie P-2*). W tym momencie powinien być dopasowany, nie ciasny. Sprawdź i upewnij się, że górna warga znajduje się całkowicie ponad plastikową osłoną wargi (*patrz zdjęcie P-3*).

Krok nr 5: Trzymając mocno uchwyt systemu Stableizer® (B), obróć konia dookoła w prawo (*patrz zdjęcie P-4*), pociągając uchwyt w dół co najmniej trzy razy i puszczając, a następnie obróć konia dookoła w lewo, wykonując tę samą procedurę, po obróceniu ustaw konia prosto. Teraz pociągnij uchwyt (B) w dół mocno lub ciasno, gdy głowa ustawia nacisk i zatrzymuje dalszy postęp. Teraz przesun czerwony przycisk kontroli naciągu w górę w kierunku górnego bloczka po raz drugi. W tym momencie odczekaj co najmniej 2 minuty, aż endorfiny zaczną działać, zanim zaczniesz jakiegokolwiek zabieg. Jeśli chcesz uzyskać większy naciąg, pociągnij w dół uchwyt (B), naciśnij i przesun czerwony przycisk kontroli

P - 1



P - 2



P - 3



P - 4



(A) bliżej bloczka. Przestrzeganie tej konkretnej procedury jest szczególnie ważne, ponieważ w ciągu ponad trzech lat testów terenowych odkryliśmy, że powyższa metoda daje następujące wyniki: (1) koń wie, że masz kontrolę, (2) prawdopodobnie zaczynają się uwalniać endorfiny i (3) koń przyzwyczaja się do nacisku stosowanego na ostatnim etapie. Zauważysz, że w tym okresie głowa konia zacznie opadać, dolna warga opadnie, a oczy złagodnieją i zaczną wyglądać na senne. Po tym możesz kontynuować zabieg, który próbujesz wykonać.

Krok nr 6: Aby zdjąć urządzenie, naciśnij i przesun czerwony przycisk naciągu (A) w dół w kierunku uchwytu (B) (spowoduje to zwolnienie całego nacisku), a następnie zsuń urządzenie przez głowę lub naciśnij i przesun czerwony przycisk w dół, a następnie odepnij górny zatrzask (G).

WAŻNA INFORMACJA: Przedłużony maksymalny nacisk powstrzymujący trwający ponad 15 minut może spowodować uszkodzenie nerwów. Stableizer® można stosować dłużej, pod warunkiem, że nacisk powstrzymujący jest mniejszy.

BARDZO WAŻNE

Jeśli zamierzasz pracować nad swoim koniem przez dłuższy czas, Stableizer® jest zaprojektowany tak, aby można było zmniejszyć naciąg o 1/2 do 3/4 cala, naciskając czerwony przycisk (A). Luz ten można zmniejszyć, powracając do wykonywanego zadania, pociągając za uchwyt (B) i ponownie ustawiając czerwony przycisk (A) na górnym bloczku (F). Nie ma konieczności zdejmowania systemu Stableizer®.

REGULACJE


Twój Stableizer® został fabrycznie dostosowany do rozmiaru konia, dla którego został zaprojektowany. Jednak w razie potrzeby skrócenia lub wydłużenia rozmiaru głowy Stableizer® został zaprojektowany tak, aby szybko zmienić rozmiar długości głowy. (Zobacz zdjęcie P-6). Wykonaj poniższe proste kroki lub obejrzyj wideo, aby uzyskać łatwe instrukcje krok po kroku.

Aby wyregulować Stableizer®

Aluminiowa tuleja (D) umieszczona u podstawy pojedynczego bloczka (H) jest „jedyną regulacją” pozwalającą na powiększenie lub skrócenie rozmiaru naczółka systemu Stableizer®.


Przytrzymaj dolny pojedynczy bloczek (H) między prawym palcem wskazującym a kciukiem, a następnie przesun aluminiową tuleję (D) znajdującą się u podstawy pojedynczego bloczka z powrotem od bloczka. W tym momencie możesz przeciągnąć linkę (I) przez aluminiową tuleję. Aby skrócić, po prostu przeciągnij linkę przez tuleję i górną część bloczka od strony zewnętrznej lub prawej. Zastosuj tę samą procedurę do powiększania, tylko pociągnij linkę w dół i przez tuleję od strony bloczka i przesun tuleję (D) z powrotem do bloczka. Po każdej regulacji zawsze przysuń plastikową rurkę (C) ciasno do tulei regulacyjnej (D). (Pamiętaj, że Stableizer® musi być dobrze dopasowany, aby działał prawidłowo). Zobacz załączone zdjęcia, aby uzyskać informacje o prawidłowym dopasowaniu. Stableizer® jest dostępny w pięciu (5) rozmiarach oznaczonych kolorami: Miniaturowy (czarny); Mały (niebieski); Średni (żółty); Duży (czerwony); Bardzo Duży (pomarańczowy).

P - 5

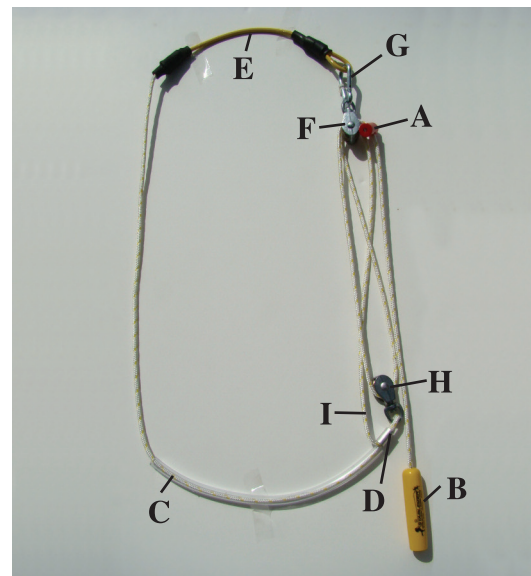

Wykonaj odpowiednie kroki ze strony 2 z częściami oznaczonymi literami, aby prawidłowo dopasować i wyregulować Stableizer®.

P - 6

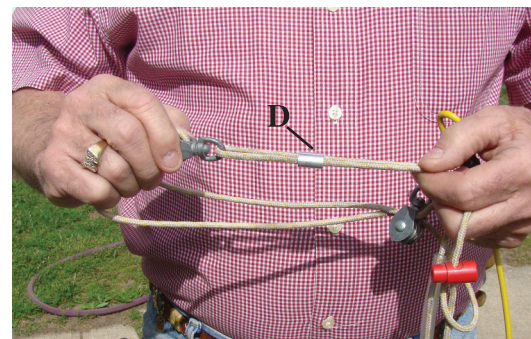

„Lekarze weterynarii i technicy z Dierenkliniek De Morette w Asse w Belgii stosują Stableizer® od 8 lat i w pełni popierają ten produkt. Odkryliśmy, że jest bardzo pomocny w większości zabiegów i uważamy go za bardzo pomocny w przypadku młodych koni i źrebiąt. Używałem systemu Stableizer® zamiast leków w leczeniu falą uderzeniową u wielu koni, nie miałem żadnych innych zastrzeżeń i nie odnotowałem żadnych reakcji.”
~ Oliver Simon, DVM, chirurg koni, Asse, Belgia, z certyfikatem A.C.V.S.

Urządzenie Stableizer® zostało zatwierdzone i jest używane przez najlepsze szkoły weterynaryjne, trenerów, profesjonalistów i jeźdźców w ponad 86 krajach.



„Używamy systemu Stableizer® zamiast łańcuszka wędzidłowego lub dutki. Większość koni nigdy nie przyzwyczaja się do bólu związanego z dutką lub łańcuszkiem wędzidłowym. Dzięki systemowi Stableizer® koń zapamiętuje uczucie euforii lub dobrego samopoczucia — to duża zaleta, ponieważ z każdym użyciem jest coraz lepiej. Dzięki systemowi Stableizer® wykonuję iniekcje dostawowe bez użycia leków. Używamy go do golenia i u koni, które trudno załadować. To najbardziej humanitarna metoda, jaką mamy, aby unieruchomić konia.”

- Stacey Van Horn, DVM

Klinika Weterynaryjna dla Koni,
Grand Island, Nebraska



Stableizer uczy konia koncentracji, w przeciwieństwie do dutki, koń jest w stanie funkcjonować, gdy jest założony.

(zobacz wideo na stronie internetowej)



„Używając systemu Stableizer® przed przyjazdem „Bucka” do Anglii i korzystając z jego doświadczenia, odkryłem, że Stableizer® jest bardzo przydatnym sprzętem do ujeżdżania i uspokajania młodych koni. Używaliśmy go u wielu roczniaków i odkryliśmy, że prawdopodobnie mamy najlepiej wychowane konie, z jakimi kiedykolwiek mieliśmy do czynienia.”

- Clive E. Brittain

Konie wyścigowe, Callburg,
New Market, Anglaterra



„Używamy The Stableizer® zamiast leków jako naszego głównego środka przytrzymującego. To bardzo humanitarny sposób na uspokojenie koni i pozwala nam przeprowadzać na nich zabiegi, które musimy wykonać. Kiedy zastosujesz go prawidłowo, możesz zauważyć efekt, który naszym zdaniem wiąże się z uwalnianiem endorfin, co uspokaja je w sposób naturalny i pozwala im tolerować zabiegi weterynaryjne. Endorfiny są naprawdę kluczem do tego naturalnego unieruchamiania. Myślę, że Stableizer® to produkt, którego każdy może nauczyć się używać, i to bezpiecznie. Jest to produkt łatwy do stosowania u konia”.

- Joe Noble, DVM

Lekarz weterynarii, Royal Vista SW,
Purcell, Oklahoma



„Nigdy nie rekomendowałem żadnego produktu, ale ten na pewno polecam... Na początku byłem bardzo sceptyczny, ale teraz używam systemu Stabilizer® u każdego konia, którego podkuwam. A one pamiętają podkuwanie jako przyjemne doświadczenie. To przekracza wszystko, w co kiedykolwiek bym uwierzył”.

- Pete Cote

Federalny czeladnik kowalski,
Old Guard Caisson Platoon, Armia
U.S.A., Ft. Meyers, VA



Stableizer jest przydatny dla osłów, mułów, zwierząt egzotycznych, wielbłądów i koni wszystkich rozmiarów.

Jeśli zwierzę przeznaczone do dojenia jest pobudzone lub nie współpracuje ze swoim opiekunem w trakcie procedury ekstrakcji mleka lub nie pozwala swemu potomstwu ssać mleka, zalecamy zastosowanie systemu Stableizer® Restraint and Training, opracowanego pierwotnie dla koni. Ten system przytrzymywania pozwala zwierzęciu uspokoić się w sposób humanitarny, zapewniając bezpieczniejsze środowisko zarówno dla opiekuna, jak i potomstwa. Uspokajający efekt pomoże również matce w dawananiu mleka.



Shown with The Stableizer® on.

OSTRZEŻENIE – Ważna informacja dla nabywcy systemu Stableizer®!
Przed użyciem tego produktu należy zapoznać się z poniższymi ostrzeżeniami: Nigdy nie przywiązuj konia za pomocą uchwytu sznurkowego systemu Stableizer®. NIE pozostawiaj konia bez opieki z założonym systemem Stableizer®. NIE stosuj u żadnego konia z wcześniejszymi urazami górnej części głowy lub pyska. W razie wątpliwości skonsultuj się z weterynarzem. Poniższe postanowienia zastępują wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Jedynym obowiązkiem sprzedawcy i producenta będzie wymiana takiej ilości produktu, która okazała się wadliwa. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby na podstawie jakiegokolwiek teorii prawnej, w tym między innymi zaniechania lub ścisłej odpowiedzialności, za jakiegokolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody utrzymane lub poniesione z powodu korzystania z produktu lub w inny sposób. Przed użyciem użytkownik określi przydatność produktu do zamierzonego użycia, a następnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Powyższe postanowienia nie mogą zostać zmienione przez osoby trzecie z wyjątkiem pracowników sprzedawcy i producenta.

Logo, nazwa STABLEIZER®, zdjęcia i wszystkie tytuły odnoszące się do produktu STABLEIZER® są: zarejestrowanym znakiem towarowym, opatentowanym i chronionym prawem autorskim. Zabrania się sprzedaży lub kopiowania jakiegokolwiek filmów, płyt DVD, towarów lub materiałów drukowanych zawierających to logo, nazwę, zdjęcia lub tytuł bez pisemnej zgody lub udzielenia licencji na takie wykorzystanie przez Wheeler Enterprises, Inc.
Wyprodukowano w USA Patent USA nr 6,058,686 *Inne patenty w toku

NASZA GWARANCJA
Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z zakupionego produktu The STABLEIZER®, skontaktuj się z nami telefonicznie, a następnie odesłaj produkt wraz z dowodem zakupu w ciągu trzydziestu dni od daty wystawienia faktury w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy. (BEZ WYJĄTKÓW). Koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi. Zamówienia niestandardowe, taśmy i płyty DVD nie podlegają zwrotowi.

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące tego produktu lub jeśli masz wątpliwości co do jego przydatności do Twojego celu, **SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM WETERYNARIJ.** Poniższe postanowienia zastępują wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane. Jedynym obowiązkiem sprzedawcy i producenta będzie wymiana takiej ilości produktu, która okazała się wadliwa. Ani sprzedawca, ani producent nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby na podstawie jakiegokolwiek teorii prawnej, w tym między innymi zaniechania lub ścisłej odpowiedzialności, za jakiegokolwiek bezpośrednie lub wynikowe szkody utrzymane lub poniesione z powodu korzystania z produktu lub w inny sposób. Przed użyciem użytkownik określi przydatność produktu do zamierzonego użycia, a następnie przyjmuje na siebie wszelkie ryzyko i odpowiedzialność z tym związane. Powyższe postanowienia nie mogą zostać zmienione przez osoby trzecie z wyjątkiem pracowników sprzedawcy i producenta.



**WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR DLA:
SŁOWACJI, REPUBLIKI CZESKIEJ
I POLSKI**

WALDOS s.r.o.**

Address : Limbova 3057/16010 07 Žilina, Slovakia, EU
Contact : Marták Milan MVDr.
Tel.: +421(0) 944 529 854
www.waldos.sk
info@waldos.sk

(Produkty wytwarzane wyłącznie przez Wheeler Enterprises, Inc.)

Odwiedź naszą stronę internetową,
aby obejrzeć filmy wideo na żywo online

youtube.com/udderlyez1

info@udderlyez.com

Bezplatny numer: 1-800-287-4791

www.udderlyez.com

Tel.: 515-332-1782

Kom.: 859-368-9509

* Przed użyciem sprzętu przeczytaj zasady zwrotu z tyłu